

ポジショニングクッション エアータイプカバー付



【用途】
側臥位、仰臥位等のポジショニングクッションとして
体位変換用のクッションとして
車椅子での円背予防に
リラックス時の腕のせにも
関節の当たる部分の保護に
ペット用のクッションとして

【特長】

- ・エアータイプのポジショニングクッションです
- ・体圧分散効果があるため、圧力を適度に分散します
- ・エアータイプなので長期間使用してもへたりません
- ・空気を抜くとコンパクトに折り畳めるので簡単に持ち運びができます
- ・空気の量を調整することで好きな高さ、使用感で使っていただけます
- ・カバーは縦横伸縮性のある肌にやさしい生地を使用
チューブ状で簡単に装着、取り外しが可能です
汚れたらすぐにとりはずし、簡単に洗濯が簡単です

【使用方法】

- ・浮き輪用の空気入れを使用して空気弁から空気を入れます
- ・空気の量は自由に調整いただけます
- ・収納する場合は、空気弁をつまんで空気を抜いてください

【お手入れ方法】
クッションが汚れた場合は布などにアルコールや塩素系消毒液を含ませ拭き取ってください
カバーは洗濯表示に従って洗濯ください。洗濯機での洗濯が可能です



【クッション】



【付属カバー】

商品名	クッション	カバー
ポジショニングクッション エアータイプカバー付	素材：塩化ビニール サイズ：44×62×高さ21cm (空気送込時サイズ) カラー：白 日本製・ラテックスフリー	素材：綿55% ナイロン45% (抗菌素材) 縦横伸縮性生地 サイズ：16×115cm (チューブ状) カラー：グレー 日本製・ラテックスフリー

【注意事項】・本品はポジショニングクッションの用途にのみご使用ください。防災用や遊泳用の浮き輪としてはご使用いただけません。・空気の入れ過ぎは、破損の原因になりますのでご注意ください。・小さなお子様手の届かないところに保管ください。なめたり、口に入れたりしないようにご注意ください。・小さなお子様だけでのご使用はお控えください。・変形や変質の原因となりますので、火気の近くや熱器具、極端に高温の場所、夏場の車内等には放置しないでください。・直射日光、高温多湿の場所には保管しないでください。・塩素系漂白剤や乾燥機のご使用はお避け下さい。・洗濯は漬けおき洗い又は手もみ洗いをお願いします。

商品詳細はこちら！



LINE 友だち募集中！



【発売元】 medicalsaizon メディカルセゾン
〒813-0034
福岡市東区多の津 5-36-15-203
TEL：092-612-8077
Mail：medicalsaizon@gmail.com
https://www.medicalsaizon.com/