

手軽で簡単!
靴下・ズボンに!

一人ではける!! 更衣ベルト

安心の
日本製

- クリップを取り付けるだけで簡単に靴下・ズボンを履くことができます
- 一人で履くのが不自由な方、股関節や腰が不自由な方、ひざの曲げ伸ばしが不自由な方、妊婦の方などに!!

共同開発者：増原クリニック

特許出願中

更衣ベルト
【素材】紐：ナイロン
クリップ等：ステンレス
【カラー】紺色



クリップの開け方

クリップの円盤とワイヤーを持ち左右に引っ張ります。

使用方法

履き方の詳細は動画をご確認ください
YouTube から「更衣ベルト」で検索!!

簡単 3 ステップ!!

靴下の場合



①くつ下の足首部分にクリップを2か所留め、くつ下につま先を入れます。



②両手で紐を引っ張り完全に靴下が履けるまで引っ張ります

外し方



③ワイヤーの先の輪っかに指を入れ引っ張ります。くつ下からクリップが自動で外れます。装着完了!

ズボンの場合



①ズボンのウエスト両側にクリップを2か所留めます



②両脚を入れ、両手で紐を引っ張り、ズボンが手が届くまで引っ張り上げます。

外し方



③引っ張り上げたら、ワイヤーの先の輪っかに指を入れ引っ張りクリップを外します。その後、完全にズボンを履きます。装着完了!

※強く引っ張り過ぎるとクリップの跡が残る場合があります。